




丹娜生物
DNK

Каталожен №: DNK-1425-1

Разработен съвместно с Институт по биология на патогените към
Китайска академия по медицински науки

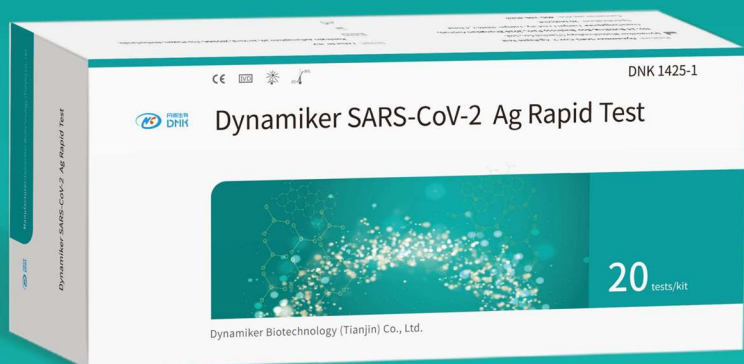

Открива COVID-19 за 10 минути

Dynamiker Бърз тест SARS-CoV-2 Ag


- Бърз - Здрав - Надежден

1 Материали включени в 1 опаковка


Всички материали, необходими за експеримента, са включени в един комплект. Всички компоненти са индивидуално опаковани, което е удобно за транспортиране, съхранение и изпитване.




2 Оперативна блок-схема

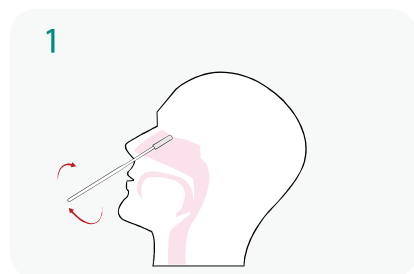


Поставете тампона в двете ноздри на пациента. Върхът на тампона трябва да се постави на разстояние до 2,5 см (1 инч) от ръба на ноздра. Завъртете тампона 5 пъти по лигавицата вътре в ноздра, за да сте сигурни, че се събират слюз и клетки.

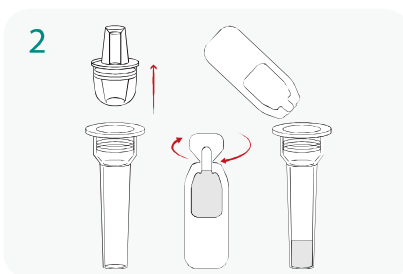


Отстранете капачката на епруветката за екстракция и я оставете настрана, като се стремите тя да остане чиста. Завъртете главата на буфера, разпределете целия буфер в епруветката за екстракция.

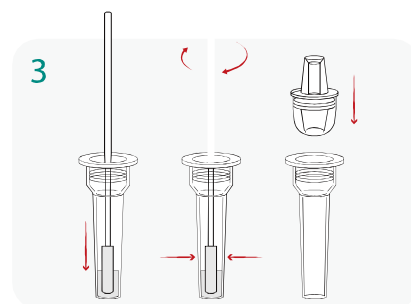

Поставете тампона в епруветката и потопете тампона нагоре и надолу в течността за минимум 10 секунди, след което задръжте тампона към дъното на епруветката и завъртете 3 пъти. Извадете тампона. Натиснете здраво капачката на дюзата върху епруветката за екстракция.

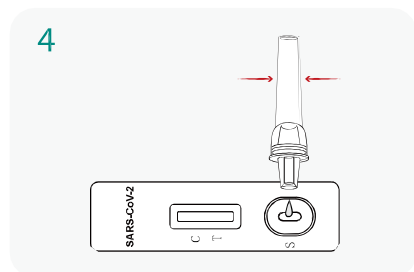

Отворете торбичката с фолио, извадете касетата и я поставете на чиста повърхност. Внимателно стиснете тялото на епруветката, като дозирате 2 капки течност в подложката за проби.

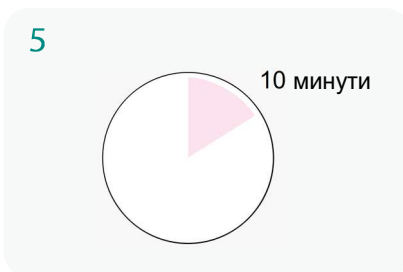

Разчетете резултатите от теста след 10-20 минути. Резултати с отклонения могат да се появят след 20 минути.



Резултатите от теста са показани на фигурата по-горе.



Dynamiker Blotechnology (Tianjin) Co., Ltd.

Адрес: Сграда №14, Еко-бизнес парк, 2018 Жонгтиан авеню, Китайско-Сингапурски Еко-град Тиендзин, Тиендзин 300467, Китай

Тел.: +86-22-25264212

И-мейл: marketing@dynamiker.com

Интернет: www.dynamiker.com